

Instruktion GlucoLog Mobile

Installation:

1. Aktivera Bluetooth på din smartphone/platta (under inställningar).
2. Sätt i sladden från BT-Device till din blodsockermätare.
3. Starta BT-Device genom att trycka på knappen på BT-Device, den gröna lampan tänds. (Om inte så ladda BT-Device med usb-sladden.)
4. Para ihop din smartphone/platta med BT-Device (under inställningar på din telefon/platta).
5. Ladda ned och installera GlucoLog Mobile från Google Play/App Store
6. Från huvudmenyn i GlucoLog Mobile välj "Patientkonfiguration", Fyll i personuppgifterna, ange överföringssätt "SMS", samt uppge mottagarens telefonnummer dit SMS med mätvärdet skall skickas, avsluta med att spara. Observera att mottagartelefonen måste kunna ta emot SMS.
7. Från huvudmenyn i GlucoLog Mobile välj "Blodsockermätarens konfiguration" och
 1. Ange typ av mätare (GlucoMen LX Plus eller Mendor Discreet)
 2. Ange mätenhet (mmol/l)
8. Tryck på "Identifiera" (Se till att BT-Device är påslagen).
9. Avsluta med att spara informationen.

Överföring av mätvärden:

1. Kontrollera att både blodsockermätaren och BT-Device är avstängda.
2. Starta och anslut BT-Device till den avstängda blodsockermätaren (LX PLUS). Mätaren skall starta och ställa sig i läge "Upload".
3. Tillbaka på huvudmenyn i GlucoLog Mobile, välj knappen "Ta emot", då laddas data ned från blodsockermätaren. När nedladdningen av mätvärden är klar ställer sig mätaren i läget "End".
4. Välj "Från-" och "Till-" datum och tryck på knappen "Skicka" för att skicka data som SMS till uppgett telefonnummer.

Felsökning

Problem: Telefonen och BT-device hittar inte varandra.

Lösning:

1. BT-device inte påslagen.
2. Bluetooth inte aktiverad på telefonen.
3. Annan elektronik ligger för nära och stör.

Problem: Inget meddelande skickas.

Lösning:

1. Fel telefonnummer inställt i appen.
2. Alternativet "SMS" ej valt i appen.
3. Inget nätverk.