

MenaLancet®

Engångslansett MenaLancet 30G



allas design malmö

Läs mer på www.menarindiagnosics.se



A.MENARINI
diagnostics

MenaLancet®

Engångslansett MenaLancet 30G

MenaLancet® är en lansett avsedd för patienters egenprovtagning och som passar till de flesta patientprovtagarna på den svenska marknaden.

Lansetten är enkel att sätta i och avlägsna ur provtagaren tack vare en greppvänlig kant upptill på lansetten. Detta minskar också risken att sticka sig ofrivilligt. Lansetten har en tunn 30G nål för att ge minimal smärta vid provtagning.

Så här använder du lansetten:

1. Rengör stickstället.
2. För in en ny lansett så långt det går i den aktuella provtagaren.
3. Vrid av nålens plastsydd och frigör nålen.
4. Tryck provtagarens topp mot fingret och tryck på avtryckaren.
5. Efter provtagningen, ta tag i kanten på lansetten och släng den i en behållare för vassa föremål. Återanvänd inte lansetten.

Tips! Innan du drar ut lansetten, stick fast nålen i plastsyddet som tidigare skyddat nålen, så riskerar du inte att sticka dig.



Beställningsinformation

MenaLancets finns i en förpackning om 200 st som kan beställas på Apotekets vnr 732620.

