



BRUKSANVISNING för GlucoJect Dual PLUS®

VARNING

- Får ALDRIG användas på mer än en person.
- Använd en ny lansett till varje stick och lämna inte kvar lansetten på anordningen.

ANVÄNDNING AV Glucoject® Dual PLUS

Tvätta händerna eller det alternativa stickstället med varmt vatten och tvål. Torka ordentligt före provtagning. Läs beskrivningarna nedan och se tillhörande bilder så att du förstår hur man använder Glucoject® Dual PLUS.

1. Skruva av provtagarens spets genom att vrida den moturs.
2. Sätt in en ny steril lansett längst ned på lansethållaren och tryck in den helt.
3. Ställ in lämpligt stickdjup genom att vrida spetsen. 1-2 för mjuk eller tunn hud, 3 för vanlig hud, 4-5 för tjock eller förhårdnad hud.
4. Dra ut glidhylsan för att låsa provtagaren.
5. Håll provtagaren stadigt mot fingret och tryck på avtryckningsknappen.
6. Tryck lansettejektorn framåt med tummen samtidigt som du drar ut glidhylsan för kassering av den använda lansetten.

ANVÄNDNING AV GENOMSKINLIGT LOCK (AST)

1. Placera provtagaren på huden på valt stickområde. Tryck ned och håll i några sekunder, tryck sedan på avtryckningsknappen för att ta ett blodprov.
2. Kontrollera genom det genomskinliga locket tills tillräcklig mängd blod erhålls. Om det inte finns tillräckligt mycket blod, massera området försiktigt tills tillräcklig mängd blod samlas



A.MENARINI
diagnostics