



















Pikaopas GlucoMen LX Plus-laitteen käyttöön

Näin asetat ajan, päivämäärän ja äänen.

- Käynnistä mittari** painamalla painiketta  yli 3 sekunnin ajan. Näytössä näkyvät hetken aikaa kaikki symbolit.
- Aseta aika.** Tuntia osoittavat numerot vilkkuvat. Selaa ja valitse oikea numero painamalla  tai . Vahvista painamalla . Aseta minuutit samalla tavalla.
- Aseta vuosi, kuukausi ja päivä.** Valitse vuosi painamalla  tai . Vahvista painamalla .
Aseta kuukausi samalla tavalla. Vahvista painamalla .
Aseta päivä samalla tavalla. Vahvista painamalla .
- Aseta ääni.** Aktivoi ääni painamalla  tai  (voit asettaa mittarin äänen päälle tai pois päältä). Valitse "on" tai "off". Vahvista painamalla .

Näin haet mittatulokset muistista.

- Käynnistä mittari painamalla  -painiketta, viimeisin mittaustulos näkyy näytössä.
- Paina  selataksesi mittaustuloksia taaksepäin (enintään 400 arvoa). Paina  selataksesi tuloksia eteenpäin.
- Keskiarvot (koskee ainoastaan glukoosiarvoja); käynnistä mittari painamalla  -painiketta. Kun painat  -painiketta uudelleen, mittari näyttää päivän keskiarvon. Paina  toistuvasti nähdäksesi viimeisimmät 1, 7, 14 ja 30 päivän keskiarvot.
- Sammuta mittari painamalla painiketta  yli 3 sekunnin ajan.

Glucomen[®] LX PLUS⁺



Kellonaika

Päivämäärä

Oikea painike

Vasen painike

On/off-painike



Vikakoodit.

- E-0 Ohjelmistovirhe. Soita asiakaspalveluun 040-32 12 70.
- E-1 Laitteen järjestelmävirhe. Soita asiakaspalveluun 040-32 12 70.
- E-2 Väärä käyttölämpötila. Lämpötila on sallitun rajan (5°C – 45°C) ulkopuolella. Anna mittarin ja tikkujen lämmitä tai jäähtyä.
- E-3 Väärä tai käytetty tikku. Ota uusi testitikku.
- E-4 Virhe verinäytteessä. Virheellinen näyte. Ota uusi testitikku.
- E-XX Muu luku kuin yllä. Soita asiakaspalveluun 040-32 12 70.
- 0:00 Paristo on vaihdettu. Aseta aika ja päivämäärä.

Anna tilatessasi seuraavat apteekin tuotenumerot:

- 50 kpl testitikkuja GlucoMen[®] LX Sensor
Apteekin tuotenro 22 01 84
- 100 kpl Lansetteja Glucoject[®] Lancets
Apteekin tuotenro 22 01 28
- 200 kpl Lansetteja Glucoject[®] Lancets
Apteekin tuotenro 22 02 29
- 1 kpl Glucoject[®] Dual näytteenotin
Apteekin tuotenro 20 47 11

Pikaopas GlucoMen LX Plus-laitteen käyttöön

Kivuton näytteenotto.

Uusi näytteenottimesi on varustettu ainutlaatuisella ja nerokkaalla Comfort Zone-tekniikalla. Ympyrässä on kahdeksan pientä pistettä, jotka estävät aivojen kivuntuntemuksen, jolloin näytteen ottaminen on käytännöllisesti katsoen kivutonta.

Tämän lisäksi voit säätää iskuvoiman siten, ettei sinun tarvitse pistää niin syväälle saadaksesi riittävän määrän verta.

Matala pisto tuntuu huomattavasti vähemmän kuin syvä. Pyri siis käyttämään matalaa pistoa ja lisää sen sijaan iskuvoimaa.

Näin käytät näytteenotinta.

1. Kierrä laitteen pää irti ja aseta uusi lansetti sisään niin pitkälle kuin se menee.
2. Kierrä pois neulan muovisuojus ja kierrä pää taas paikalleen.
3. Säädä haluamasi piston syvyys 0–6 (0 on matalin ja 6 syvin) ja iskuvoima (kolme tasoa) asettaaksesi piston ihotyypiksi mukaan.
4. Tartu näytteenottimen takaosaan ja vedä kunnes kuulet naksahduksen. Näytteenotin on nyt valmi.
5. Paina näytteenottimen pää sormeasi vasten ja paina liipaisinta.
6. Poista lansetti näytteenoton jälkeen ja aseta se teräville esineille soveltuvaan astiaan. Älä käytä lansettia uudelleen.


Vihje! Ennen kuin vedät lansetin pois, työnnä neula sitä aiemmin suojanneeseen muovipalaseen. Näin vältät pistämästä itseäsi vahingossa.



1.



2.

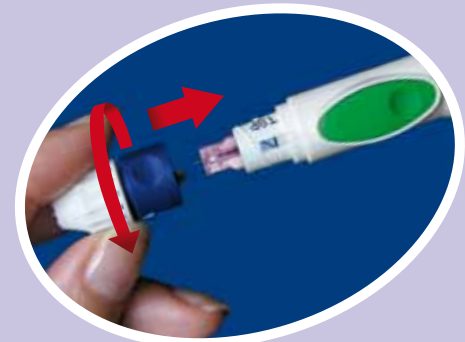

4.



6.







Pikaopas GlucoMen LX Plus-laitteen käyttöön

Näin mittaat verensokerin/ketoarvon.


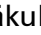
1. Pese kädet saippualla ja vedellä.
2. Ota esiin glukoosi (tai keto) -testitikku.
3. Työnnä testitikun kullanvärinen kontaktipinta mittarin aukkoon.
4. Mittarissa näkyy vilkkuva veripisara ja se on nyt valmis mittausta varten.
5. Pistä näytteenottimella sormeen.
6. Aseta veripisara tikun päätä vasten, jolloin se imee itseensä oikean määrän verta.
7. Luettuasi tuloksen (tarvittava aika on 4 sekuntia glukoositikun ja 10 sekuntia ketotikun kohdalla) voit ottaa testitikun pois ja hävittää sen. Mittari kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Näin voit kirjata mittatuloksen muistiin (vain glukoosi)

1. Valitse haluamasi merkintä nuolinäppäimillä ("ennen ateriala", "aterian jälkeen", "harjoittelu" tai "tarkistusmerkki").
2. Vahvista merkintä painamalla painiketta .
3. Valitessasi merkinnän "ennen ateriala" voit asettaa hälytyksen "aterian jälkeistä" koetta varten 2,5 h myöhemmin. Aseta hälytys PÄÄLLE tai POIS painamalla joko  tai  ja vahvista painamalla .

Huom: Mittari EI tallenna mittatulosta automaattisesti, jos minuutin aika kuluu umpeen tai jos testitikku otetaan pois.

Näin vaihdat GlucoMen® LX-laitteeseen pariston.

GlucoMen® LX PLUS-laitteessa käytetään yhtä CR2450-paristoa. Kun paristo on lähes tyhjä, mittalaitteessa näkyy  oikeassa yläkulmassa ja veripisara  vasemmassa alakulmassa ja sinulla on virtaa käytettävissä vielä n. 20 mittauskertaa. Paristosymboli näkyy näytössä kunnes olet vaihtanut pariston. Saadaksesi uuden pariston, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 040-32 12 70. Lähetämme sinulle uuden pariston ilmaiseksi.

Toimi seuraavasti vaihtaaksesi laitteeseen pariston:


1. Irrota paristotilan kansi mittarin takapuolelta.
2. Poista paristo ja vaihda tilalle uusi siten, että "+"-puoli on ylöspäin.
3. Aseta kansi takaisin paikalleen.

Asiakaspalvelu 040-32 12 70 tai info@menarinidiagnostics.se

GlucoMen® LX PLUS+

Aukko testitikku varten

Kontaktipinta

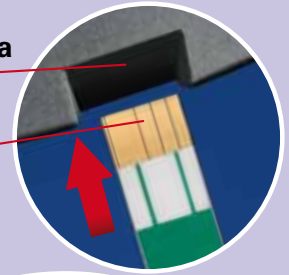

3.



6.

