



















Snabbguide till GlucoMen LX Plus

Så här ställer du in tid, datum & ljud.

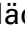- 1. Starta mätaren** genom att hålla in  i mer än 3 sek. Skärmen visar för ett ögonblick alla symbolerna.
- 2. Ställ in tid.** Siffrorna för timme blinkar. Bläddra och välj genom att trycka på  eller . Bekräfta med . Ställ in minuter på samma sätt.
- 3. Ställ in år, månad och dag.** Välj år genom att trycka på  eller . Bekräfta med .
Ställ in månad på samma sätt. Bekräfta med .
Ställ in dag på samma sätt. Bekräfta med .
- 4. Ställ in Ljud.** Tryck på  eller  för att aktivera ljudet (du kan välja om mätaren ska ha ljud eller vara tyst). Välj "on" eller "off". Bekräfta med .

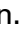Så här hämtar du mätresultat ur minnet.

1. Sätt på mätaren med -knappen och det senaste mätresultatet visas i displayen.
2. Tryck på  för att bläddra bakåt i tiden (max 400 värden). Tryck  för att gå framåt.
3. Genomsnittsvärden (gäller enbart glukosvärden); sätt på mätaren med -knappen. Tryck på  igen och mätaren visar dagens genomsnitt. Fortsätt att trycka på  för att visa de senaste 1, 7, 14 och 30 dagarnas genomsnitt.
4. Håll  intryckt i mer än 3 sek för att stänga av mätaren.

Felkoder.

- E-0 Fel på mjukvaran. Ring kundtjänst 040-32 12 70.
- E-1 Systemfel på hårdvaran. Ring kundtjänst 040-32 12 70.
- E-2 Felaktig användningstemperatur. Temperaturen ligger utanför gränsen (5°C–45°C). Låt mätare och stickor värmas upp eller svalna.
- E-3 Fel eller använd sticka. Ta en ny teststicka.
- E-4 Blodprovfel. Felaktigt prov. Ta en ny teststicka.
- E-XX Annan siffra än ovan. Ring kundtjänst 040-32 12 70.
- 0:00 Batteriet har bytts ut. Ställ in tid och datum.

Kundtjänst 040-32 12 70 eller info@menarinidiagnostics.se

GlucoMen[®] LX PLUS⁺



Ange följande Apotekets varunummer när du beställer:

- 50 st teststickor GlucoMen[®] LX Sensor
Apotekets vnr. 22 01 84
- 100 st Lansetter Glucoject[®] Lancets
Apotekets vnr. 22 01 28
- 200 st Lansetter Glucoject[®] Lancets
Apotekets vnr. 22 02 29
- 1 st Glucoject[®] Dual provtagare
Apotekets vnr. 20 47 11

Snabbguide till GlucoMen LX Plus

Smärtfri provtagning.

Din nya provtagare är utrustad med den unika och geniala *Comfort Zone-teknologin*. Åtta små punkter i en cirkel, som blockerar hjärnans känseluppfattning så att provtagningen blir praktiskt taget smärtfri.


Att du dessutom kan ställa slagkraften, gör att du inte behöver sticka så djupt för att få rätt mängd blod.

Ett grunt stick känns betydligt mindre än ett djupt. Så sträva efter ett grunt stickdjup och öka istället slagkraften.

Så här använder du provtagaren.

1. Skruva av toppen och för in en ny lansett så långt det går.
2. Vrid av nålens plastskydd och skruva på toppen igen.
3. Ställ in önskat stickdjup 0–6 (0 är grundast och 6 är djupast) och slagkraft (tre lägen) för att anpassa sticket till din hudtyp.
4. Ta tag i provtagarens bakre del och dra ut den tills du hör ett klickljud. Nu är provtagaren laddad.
5. Tryck provtagarens topp mot fingret och tryck på avtryckaren.
6. Ta ut lansetten efter provtagningen och släng den i en behållare för vassa föremål. Återanvänd inte lansetten.

Tips! Innan du drar ut lansetten, stick fast nålen i den fyrkantiga plastbiten som tidigare skyddat nålen, så riskerar du inte att sticka dig.

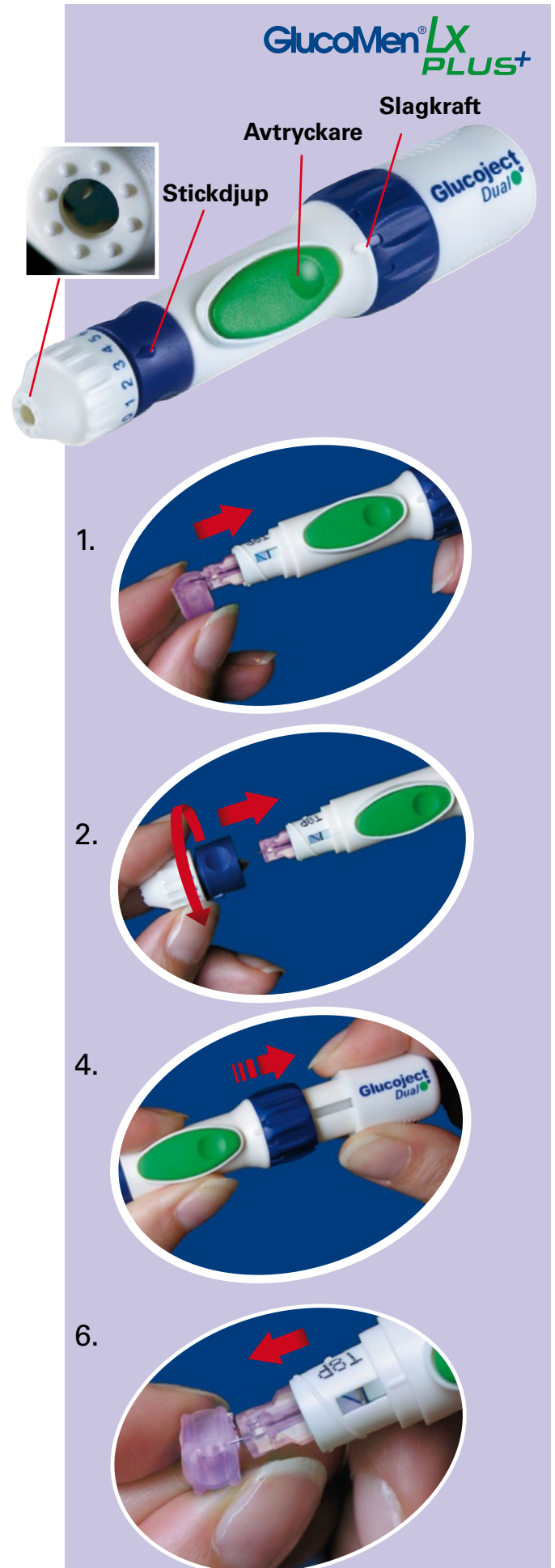





Snabbguide till GlucoMen LX Plus

Så här mäter du blodsockret/ketonvärdet.



1. Tvätta händerna med tvål och vatten.
2. Tag en glukos- (eller keton-) teststicka.
3. För in den ände av teststickan som har en guldfärgad kontaktyta, i mätarens öppning.
4. Mätaren visar en blinkande bloddroppe och är nu klar för mätning.
5. Stick med provtagaren.
6. Sätt bloddroppen mot stickans kortände som själv suger upp rätt mängd blod.
7. När du läst av resultatet (efter 4 sekunder för glukosstickor och 10 sekunder för ketonstickor) kan du ta ut teststickan och slänga den. Mätaren stänger av sig automatiskt.

Så här kan du markera ett mätvärde (endast glukos)

1. Välj önskad markering med pilknapparna ("före måltid", "efter måltid", "träning" eller "bock").
2. Bekräfta markering genom att trycka på -knappen.
3. Vid val av markeringen "före måltid" ges möjlighet att sätta larm för ett "efter måltidstest" 2,5 h senare. Ställ larmets status PÅ eller AV genom att trycka på antingen  eller  samt bekräfta med .

Obs: Mätaren sparar *INTE* automatiskt någon markering om tidsförloppet på en minut löper ut eller om teststickan tas bort.

Så här byter du batteri i GlucoMen® LX.

GlucoMen® LX PLUS drivs av ett CR2450 batteri. När batteristyrkan är låg visar mätaren  i övre högra hörnet och en bloddroppe  i nedre vänstra hörnet och du har ström för ytterligare ca 20 mätningar. Batterisymbolen ligger kvar tills du byter batteriet. Kontakta vår kundtjänst på tel 040-32 12 70, så skickar vi ett batteri till dig kostnadsfritt.

Gör på följande sätt för att byta ut batteriet:


1. Ta av batterilocket på baksidan av mätaren.
2. Ta bort batteriet och byt ut det med ett nytt med "+"-sidan uppåt.
3. Sätt tillbaka locket.

Kundtjänst 040-32 12 70 eller info@menarinidiagnostics.se

GlucoMen® LX PLUS⁺

Öppning för teststickan

Kontaktyta

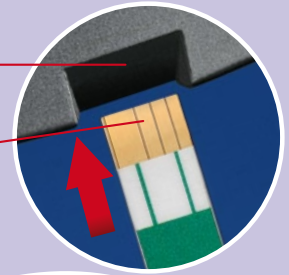

3.



6.

