

Smärtfri

**Ingen smitta,
ingen smärta!**

Hygienisk



säker

Securject®
Pro 

Ny blodprovstagare för professionellt bruk

Securject[®] Pro

Så här fungerar Securject Pro:



Välj stickdjup efter hudtyp och hur mycket blod som behövs.

Securject Pro har 5 olika stickdjup:

- nivå 1: 1,3 mm
- nivå 2: 1,6 mm
- nivå 3: 1,9 mm
- nivå 4: 2,2 mm
- nivå 5: 2,5 mm



För in en Securject Pro i lansethållaren tills du hör två klickljud (klick, klick). Vrid av plattformen och fäst den på provtagaren.



Tryck plattformen mot patientens finger och ta blodprovet.



Skjut ut plattform och lansett (i en behållare för vassa föremål) med en knapptryckning.

Indikatorfönster.
Säkerhetskontroll. När lansetten använts, syns en röd prick i fönstret.

**Skyddslock/
plattform**


Ejektorknapp.
Avlägsnar lansetten efter provtagningen.

Avtryckare

Djupreglage
Här ställs önskat stickdjup.

Securject Pro - den säkra och smärtfria blodprovstagaren för professionellt bruk!

Securject Pro är utrustad med den unika och geniala *Comfort Zone-teknologin (CZT)*.^{*} Hemligheten är åtta små punkter i en cirkel. När de trycks mot fingertoppen skickas en positiv signal av beröring till hjärnan.

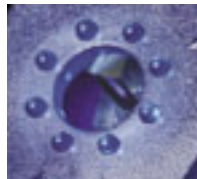

Då sticket kommer är signalvägen redan blockerad och smärtsignalen når inte fram. Tillsammans med Securject Pros höga stickhastighet blir provtagningen praktiskt taget smärtfri för patienten.

Securject Pro är speciellt utvecklad till sjukvårdsinrättningar för enkel och professionell blodprovstagning från fingertopparna. Med sin genomtänkta design är den hygienisk^{**}, säker och lätt att använda på samma gång. Den är ställbar med 5 olika stickdjup, dels för att erhålla rätt volym blod och dels för att kunna anpassas till olika patienter.

Efter provtagning ejekteras plattform samt lansett genom ett enkelt knapptryck. Detta garanterar att alla delar av blodprovstagaren som har kommit i kontakt med patientens hud eller blod alltid byts ut.



NO CONTAMINATION

Ingen risk för blodsmitta. Alla delar som varit i kontakt med patientens hud och blod byts ut.



COMFORT ZONE TECHNOLOGY

Åtta små punkter i en cirkel för smärtfri blodprovstagning.



AUTOMATIC EJECTION

Efter provtagning skjuts plattform och lansett ut med ett knapptryck och utan att vidröras.

^{*} Melzack, R. and Wall, P.D (1982) The Challenge of Pain (Penguin, Harmondsworth), p233
^{**} Godkänd av Hygiensjuksköterskorna Region Skåne

A. Menarini Diagnostics är ett hälsovårdsföretag med ett världsomspännande nätverk av dotterbolag, samarbetspartners och återförsäljare med fokus på diabetes, hematologi, klinisk kemi, urinalys och immunologi. A. Menarini Diagnostics ingår som en division i Menarini-koncernen som är Italiens största internationella farmaceutiska bolag och marknadsledande i Sydeuropa. Menarini-koncernen har över 11000 anställda och en omsättning på ca 2 miljarder euro.



Kundsupport 040-32 12 70 www.menariniagnostics.com

Varsagod! Prova Securject Pro och låt patienten känna skillnaden!

Fyll i svarstalongen och posta den till oss, så skickar vi en Securject Pro blodprovstagare till dig kostnadsfritt.

Namn

Titel

Sjukhus/mottagning

Adress

Postnummer Ort

E-post

All information hämtad från detta kort kan användas av Menarini Diagnostics i enlighet med Personuppgiftslagen 1998:204. Ingen information kommer att lämnas vidare. Menarini Diagnostics kommer eventuellt att skicka information om våra nya produkter och allmän information.

Ja tack, jag godkänner att Menarini Diagnostics använder mina uppgifter enligt ovan.

Underskrift:

Porto
betalt

**A. Menarini Diagnostics
Nordic Countries**

SVARSPOST
20479946
214 00 Malmö