

Håll koll – även på avstånd!

Blodsocker-
värden direkt
i mobilen



bluetooth



SMS



Säkerhet, trygghet och livskvalitet

Med **GlucoLog B.T. device** har du trådlös kontroll på ditt barns diabetes även på förskolan, hos mormor osv. Risken för felskrivningar elimineras, livet blir tryggare och ditt barn kan leva ett så vanligt liv som möjligt.

Glucolog[®] M B.T. device

Glucolog B.T. device är en tekniskt avancerad Bluetooth-enhet som möjliggör direktöverföring av blodsocker- och ketonvärden från blodsockermätaren till en smartphone eller läsplatta. För detta krävs följande:

- GlucoMen LX PLUS Blodsockermätare
- Glucolog B.T. Device
- Glucolog Mobile eller Glucolog Lite (applikation)
- Smartphone och läsplatta (Android eller Apple)



ON/OFF-knapp

Grön lampa lyser =
enheten aktiverad

Batteri status:
Röd lampa = urladdad
Gul lampa = laddar

Anslutning
blodsockermätare

Laddningsanslutning USB

Så här fungerar det:

Glucolog B.T. device kopplas till blodsockermätaren. I telefonen aktiverar man Bluetooth så att enheterna paras ihop. Därefter är det möjligt att överföra data från mätaren till en smartphone eller läsplatta med gratisapplikationen *Glucolog Mobile* och *Glucolog Lite*.



Med **Glucolog Mobile** kan du registrera dina testresultat och skicka dem vidare som SMS till en förutbestämd mottagare. SMS:et innehåller keton/blodsockervärde, datum och tidpunkt för de senaste mättillfällena.



Glucolog Lite är en dagbok där dina värden sparas och sorteras efter tid och dag och du kan analysera förändringar som presenteras i diagram och grafer. All information kan skickas vidare med e-post till t ex din diabetes-sköterska.

Kom igång snabbt. Se vår instruktionsvideo på följande länk:
<http://www.youtube.com/watch?v=Kbxmcb1oozl>

Räckvidd (visuell kontakt)	40 meter
Förvaringstemperatur	-40° C till +80° C
Arbetstemperatur	0° C till +60° C
Batteritid	ca 1 vecka
Batteriladdning	USB
Kompatibilitet Telefoner	Android OS (läsplattor och smartphones), iOS (iPhone, iPad)
Kompatibilitet Blodsockermätare	Glucomen LX PLUS



Gilla GlucoMen på Facebook
www.aoe.no

