

Ny Bluetooth-device

passar alla våra blodsockermätare!

GlucoLog 
B.T. Plus 



**Funkar även
till iPhone***



Bättre koll på din diabetes!

Med **GlucoLog B.T. Plus** och tillhörande applikationer får du en mer överskådlig dokumentation av blodsockervärdena än t ex med en vanliga pappersdagbok. Dessutom har du ju alltid värdena tillgängliga i din telefon. Inmatningen är enklare och risken för felskrivning minskar.

* GlucoLog B.T. Plus använder **Bluetooth 4.0 (BT LE)** som används av följande iPhones: 4s, 5, 5c, 5s, 6, och 6 Plus. Samt följande iPads: 3rd generation, mini, mini 2, mini 3, Air och Air 2.


GlucoLog B.T. Plus funkar med alla våra blodsockermätare!



Glucolog M B.T. Plus

Glucolog B.T. Plus är en helt ny Bluetooth-enhet som möjliggör direktöverföring av blodsockervärden från din blodsockermätare till en smartphone eller läsplatta. För detta krävs följande:

- Blodsockermätare (Glucomen Areo, Glucomen LX plus eller Mendor Discreet)
- Glucolog B.T. Plus
- Glucolog Lite (applikation)
- Smartphone och läsplatta (Android eller Apple)*

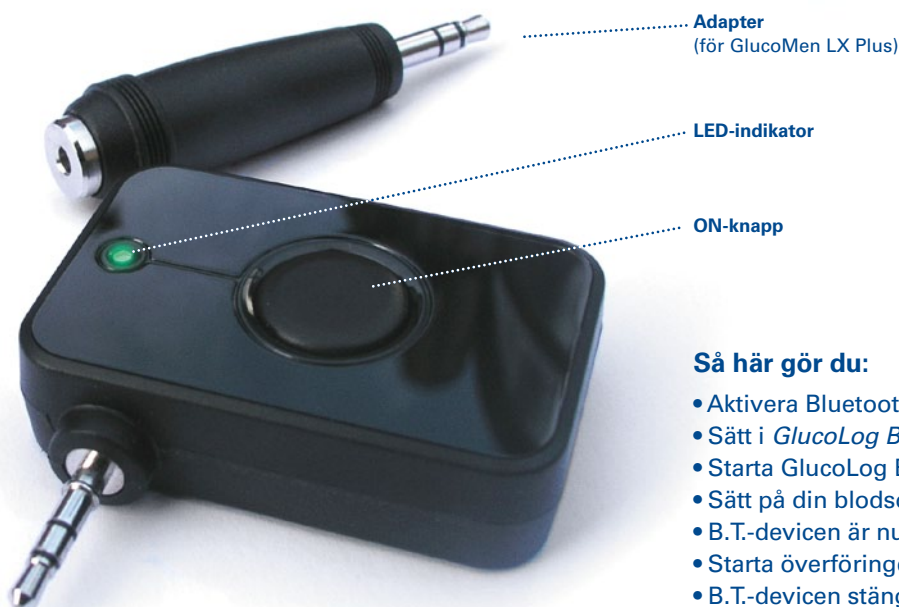

Funkar med alla våra mätare

Så här gör du:

- Aktivera Bluetooth i din smartphone så att enheterna parkopplas.
- Sätt i *Glucolog B.T. Plus* i din Blodsockermätare.
- Starta Glucolog B.T. Plus (on-knappen) LED-lampan blinkar till.
- Sätt på din blodsockermätare om den inte startat automatiskt.
- B.T.-devicen är nu redo att sända.
- Starta överföringen från din app (ex Glucolog Lite).
- B.T.-devicen stänger sig automatiskt efter 30 sekunder.

Räckvidd (visuell kontakt)	10 meter
Förvaringstemperatur	-10° C till +45° C
Arbetstemperatur	0° C till +45° C
Batteri	3V lithium (CR2032)
Kompatibilitet Telefoner	Android OS (läsplattor och smartphones), iOS (iPhone, iPad)*
Kompatibilitet Blodsockermätare	Glucomen Areo, Glucomen LX plus Mendor Discreet



Med **Glucolog Mobile** kan du registrera dina testresultat och skicka dem vidare som SMS till en förutbestämd mottagare. SMS:et innehåller blodsockervärde, datum och tidpunkt för de senaste mättillfällena.

Glucolog Lite är en dagbok där dina värden sparas och sorteras efter tid och dag och du kan analysera förändringar som presenteras i diagram och grafer. All information kan skickas vidare med e-post till t ex din diabetessköterska.

* Glucolog B.T. Plus använder **Bluetooth 4.0 (BT LE)** som används av följande iPhones: 4s, 5, 5c, 5s, 6, och 6 Plus. Samt följande iPads: 3rd generation, mini, mini 2, mini 3, Air och Air 2.



Gilla Glucomen på Facebook
www.aredo.nu
shop.menariniagnostics.se
www.diabetesappar.se

